

Referenzbericht

Direkt-digitales Röntgen mit **Amadeo** in der
Fachtierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Beate Fischer-Wackes
und Dr. Jörg Wackes in Gundelfingen, Deutschland



Tierärztliche Gemeinschaftspraxis

Dr. Jörg Wackes
Dr. Beate Fischer-Wackes

79194 Gundelfingen
Tel. 0761-5950015
info@wackes-tieraerzte.de
www.wackes-tieraerzte.de

 Amadeo-Systeme

Referenzbericht

Die Praxis von Dr. Beate Fischer-Wackes und Dr. Jörg Wackes bietet alle Leistungen einer Kleintierpraxis inklusive bildgebender Diagnostik mit Röntgen, Ultraschall und Endoskopie. Schwerpunkte bilden die Bereiche Dermatologie, Goldimplantation, (endoskopische) Chirurgie, Zahnheilkunde und Physiotherapie. Pro Quartal werden in der Praxis mehrere hundert Röntgenaufnahmen erstellt.

Seit Anfang des Jahres 2011 arbeitet die Praxis mit einem direkt-digitalen Röntgenkomplettsystem. Das Amadeo DR-System umfasst einen Patientenlagerungstisch mit schwimmender Tischplatte, den Röntgengenerator, der platzsparend direkt im Röntgentisch integriert ist, und einen DR Tech Flaatz 560 Detektor.

„Vor der Anschaffung des neuen Röntgensystems haben wir uns die letzten Jahre im Kollegenkreis umgehört und da wurden uns von verschiedenen Seiten Lösungen von Oehm und Rehbein empfohlen“, erläutert Dr. Jörg Wackes. „Zuvor haben wir analog geröntgt. Beim direkt-digitalen Röntgen mit Detektor ist der Arbeitsablauf deutlich zügiger“, benennt er einen der Vorteile des neuen Röntgensystems.

„Die Bildqualität ist sehr gut im Gesamtbild. Bildbearbeitung und Bildgewichtung sind möglich und sinnvoll, dadurch gewinnen wir einen höheren Informationsgehalt aus einer Aufnahme.“

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de



Dr. Jörg Wackes,
Fachtierarzt für Klein-
und Heimtiere



Die *dicomPACS®DX-R* Akquisitionsoftware wird per Touchscreen bedient. Anschließend werden die erstellten Bilder mit dem *dicomPACS®vet* Bildmanagementsystem befundet und archiviert.

„Die Befundung ist einfach und modern. Hilfreich sind dabei die zahlreichen *dicomPACS®vet* Funktionalitäten wie Annotationen, Rasterdarstellungen, Vergrößerung, Lupenfunktion, Hell-/Dunkel-Kontraständerungen und Bildexport. Dank der unkomplizierten Archivierung haben wir auch später einen schnellen Zugriff auf die Bilder. Und die Anbindung an meine Praxissoftware Vetinf funktioniert problemlos“, berichtet Dr. Wackes.

Aber auch Service und Beratung stellen für die Tierärzte einen wichtigen Bestandteil dar. „Mit dem technischen Support von Oehm und Rehbein sind wir sehr zufrieden“, stellt Dr. Wackes fest. „Fehlermeldungen werden am Telefon freundlich aufgenommen. In dringenden Situationen erfolgt eine sofortige Weiterleitung beziehungsweise eine zeitnahe Reaktion. Insgesamt können wir bei Oehm und Rehbein immer auf eine gute Erläuterung und lösungsorientierte Hilfe zählen.“



Das Amadeo-Röntgensystem der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dres. Wackes wurde 2011 installiert und nicht mehr im Angebot. Untenstehend finden Sie unser aktuelles Modell.



 **Oehm und Rehbein**

Platzsparendes
Röntgen-Komplettsystem
für die Kleintiermedizin –
jetzt "Made in Germany"!

Amadeo V mini II

Der vollkommen ebene 4-Wege-Schwimmtisch ohne Aufkantungen wird Sie begeistern. Dieses Veterinär-Röntgensystem ist eine Eigenentwicklung „Made in Germany“ der Oehm und Rehbein GmbH und das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Tierärzten und universitären Einrichtungen.

Der PC sowie eine Schublade für Lagerungshilfen sind platzsparend direkt im Röntgentisch eingefügt. Der 32kW-Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisierblende ist ebenfalls im Röntgentisch integriert. Über die völlig geräuschfreie Fußbremse am Tisch kann sowohl die Bewegung der Tischplatte gestoppt als auch das Licht am Kollimator bedient werden. Für die Stromversorgung genügt der Anschluss an eine Standardsteckdose.

Der um 180° schwenkbare und höhenverstellbare Touchscreen-Monitor gestattet eine bequeme Bedienung der Röntgensoftware auf engstem Raum. Die Integration Ihres Praxisverwaltungssystems ist für uns selbstverständlich. Eine 3-stufige LED-Statusanzeige am Röntgenstativ realisiert die einfache Visualisierung des Betriebszustands. Mit Hilfe des 2-stufigen Fußschalters kann der Röntgenschuss vorbereitet und ausgelöst werden.

Unternehmenszentrale:

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom
www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk

Info-Hotline: +49 381 36 600 600



Weitere detaillierte
Informationen
zum **Amadeo V mini II**
finden Sie hier.